

MediCap[®] USB300

如何升級

新版韌體新增功能

您可以升級 USB300 的韌體來為這台機器增加新功能¹。韌體的最新版本是 110701。它包含下列新增功能：

- **列印** – 您現在可以列印圖像到 Sony UP-DR80MD 醫療彩色印表機。詳細說明請參閱 *MediCap USB300 列印指南*。MediCapture 各類指南文件可至 medicapture.com/support 讀取下載。
- **錄到網路磁碟機** – USB300 一向能讓您將影像錄到機器本身的內部硬碟或外接式 USB 隨身碟。新版韌體增加了第三種錄影選項：現在您可以「透過網路」將畫面錄到網路磁碟機。詳情請參閱 *MediCap USB300 網路連線指南*。
- **從內部磁碟機中複製** – 現在您可以將存在 USB300 內部硬碟的影片和圖像複製到外接式 USB 隨身碟。詳情請參閱 *MediCap USB300 使用者指南*。
- **將 USB 隨身碟格式化** – USB300 現在提供十分簡便的 USB 隨身碟格式化功能，確保隨身碟與 USB300 之間的相容性。
- **檢視之前患者的面診畫面** – 除了檢視目前患者的面診影片外，您現在也可以檢視之前面診的視訊畫面。只有錄製到內部硬碟或外接式 USB 隨身碟的影片可以使用本功能，若是錄到網路磁碟機則無法使用 (這種情況您只能檢視目前面診的影片畫面。) 詳情請參閱 *MediCap USB300 使用者指南*。

如何升級機器韌體

1. 建立一個「升級快閃隨身碟」。要建立升級快閃隨身碟，請下載「升級檔案」到一個空的 USB 快閃隨身碟中。升級檔案的名稱為 "usb300-xxxxxx.upd"，其中 "xxxxxx" 是版本編號。如果 MediCapture 尚未提供您下載升級檔案的網頁連結，您可以寄電子郵件到 support@medicapture.com 索取。
2. 打開 USB300 的電源，將升級快閃隨身碟插進正面面板的 USB 連接埠。
3. 按下 *Menu* (選單) 按鈕。螢幕將顯示「主選單」畫面。
4. 利用箭頭按鈕選取「進階」，然後按下 *Menu* (選單) 按鈕。螢幕將顯示「進階選單」畫面。
5. 選取「升級」。「升級」畫面將會顯示。
6. 選取「升級」。「升級確認」畫面將會顯示。再次選取「升級」後，升級程序即會開始進行。

重要提醒：升級進行中切勿取下快閃隨身碟或關掉機器電源。

7. 升級過程約需三、四分鐘。當您看到螢幕上顯示：「升級完成：請關上電源以重新啟動機器」，即表示升級過程已經完成。您的 USB300 錄影機已經完成升級，可以立即開始使用。

¹如欲查看您的韌體版本，請利用「進階」功能表中的「目前設定」選項。