

MediCap® USB300

Aktualisierung

Was ist neu in der neuesten Firmware

Sie können Ihr USB300 um neue Funktionen erweitern, indem Sie die Firmware des Gerätes aktualisieren.¹ Die neueste Version der Firmware (110701) beinhaltet die folgenden Verbesserungen:

- **Drucken** – Sie können jetzt Bilder auf einem Sony UP-DR80MD Farbdrucker für medizinische Anwendungen ausdrucken. Für Details siehe die *Druckanleitung für das MediCap USB300*. Anleitungen und Handbücher von MediCapture stehen unter medicapture.com/support zur Verfügung.
- **Aufnahme auf eine Netzlaufwerk** – Sie konnten schon immer mit dem USB300 auf die internen Festplatte oder ein externes USB-Laufwerk aufzeichnen. Die neue Firmware ermöglicht eine dritte Aufnahmeoption: Sie können jetzt „über das Netzwerk“ auf ein Netzlaufwerk aufnehmen. Für weitere Informationen siehe das *Netzwerkhandbuch für das MediCap USB300*.
- **Von der internen Festplatte kopieren** – Sie können jetzt Videos und Bilder von der internen Festplatte des USB300 auf ein externes USB-Laufwerk kopieren. Für weitere Informationen siehe das *Benutzerhandbuch für das MediCap USB300*.
- **Ein USB-Laufwerk formatieren** - Das USB300 kann jetzt problemlos ein USB-Laufwerk formatieren. Hierdurch wird gewährleistet, dass das Laufwerk mit dem USB300 kompatibel ist.
- **Übersicht früherer Patientensitzungen** – Neben der Übersicht von Videos von Aufnahmesitzungen des aktuellen Patienten können Sie jetzt auch Videos von früheren Sitzungen durchsehen. Diese Funktion steht bei Aufnahmen auf die interne Festplatte oder ein externes USB-Laufwerk, aber nicht bei Aufnahmen auf ein Netzlaufwerk zur Verfügung (in dem Fall können Sie nur Videos von der aktuellen Sitzung durchsehen). Für weitere Informationen siehe das *Benutzerhandbuch für das MediCap USB300*.

So aktualisieren Sie die Firmware des USB300

1. Erstellen Sie einen „Aktualisierungs-USB-Stick“. Laden Sie hierzu die „Aktualisierungsdatei“ herunter und kopieren Sie sie auf einen leeren USB-Stick. Die Aktualisierungsdatei heißt „usb300-xxxxxx.upd“, wobei „xxxxxx“ eine Versionsnummer ist. Wenn MediCapture Ihnen nicht bereits einen Weblink zum Herunterladen der Aktualisierungsdatei zur Verfügung gestellt hat, senden Sie eine E-Mail-Anfrage an: support@medicapture.com.
2. Schalten Sie das USB300 ein und stecken Sie den Aktualisierungs-USB-Stick auf der Vorderseite ein.
3. Drücken Sie die Taste „Menü“ (Menu). Das „Hauptmenü“ wird angezeigt.

¹ Zur Überprüfung der Firmware-Version verwenden Sie die Option „Aktuelle Einstellungen“ im Menü „Erweitert/Weitere Optionen“.

4. Markieren Sie mit den Pfeiltasten „Erweitert/Weitere Optionen“ und drücken Sie die Taste „Auswahl“ (Select). Das Menü „Erweitert/Weitere Optionen“ wird angezeigt.
5. Wählen Sie „Aktualisierung“. Das Dialogfeld „Aktualisierung“ wird angezeigt.
6. Wählen Sie „Aktualisierung“. Das Dialogfeld „Aktualisierungsbestätigung“ wird angezeigt. Wählen Sie noch einmal „Aktualisierung“. Hierdurch beginnt der Aktualisierungsvorgang.

Sehr wichtig: Während der Aktualisierung nicht den USB-Stick herausziehen oder das Gerät ausschalten.

7. Der Aktualisierungsvorgang kann 3 - 4 Minuten dauern. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn diese Meldung angezeigt wird: „Aktualisierung abgeschlossen: Gerät durch Ausschalten neu starten“. Ihr USB300 ist jetzt aktualisiert und einsatzbereit.