

MediCap[®] USB300 打印指南

适用于韧体 110701 及更高的版本¹

MediCap USB300 能够在 Sony UP-DR80MD 医疗彩色打印机上打印图像²。如需本台打印机的详细信息，请参阅 Sony 公司的相关文件说明。

如何连接打印机

用打印机所附的接线，将打印机接到 USB300 机身背面的 USB 端口，然后将打印机电源线插进墙壁插座。确定打印机的电源已打开，专用纸张已经装好。该打印机及 USB300 录像机均不需另外设定。

如何打印

印列时，您要将图像放到「打印队列」，然后印出一页含有这些图像的页面。您只需按 USB300 上的按钮来执行这些步骤，不需按打印机上的按钮。

1. 录下一些画面后，请按 **选择 (Select)** 按钮以进入「检视模式」。
2. 使用前进和后退键 (箭头按钮) 来找出您想要打印的图像。
3. 按下 **选单 (Menu)** 按钮。「打印」画面将会显示。本画面提供三个选项：返回、打印与快速打印。
4. 选择「打印」。这个指令会将第一个图像放到打印队列。
5. 选择「返回」。这个指令会让您回到检视模式。
6. 重复步骤 2-5，来将更多图像放进打印队列³。
7. 当最后一个图像被放进打印队列时，包含这些图像的页面即开始自动打印，打印队列随即清空。

打印附注说明

- 如欲在队列未满足之前即打印图像，您可以在放进想要的图像后选择「快速打印」。如果您希望一页只印一个图像，这个选项就相当好用。
- 病例编号会打印在每一页最上方，图像编号则印在每个图像旁边。如果您有选用患者数据这项功能，则患者数据会打印在每一页最上方 (姓、名等等)。
- 「打印」屏幕左下角会显示打印机纸卷所剩余的打印张数。
- 本机器通常提供目前病人面诊的图像打印。如欲打印之前患者面诊的图像，请利用「患者检视」功能⁴。欲使用此项功能，请到「进阶选单」选择「储存管理」，然后选择「患者检视」。这会让您看到之前患者面诊中的图像。当您看到想要打印的图像时，请按下 **选单 (Menu)** 按钮 (上面的步骤 3)。如需「患者检视」功能的更多信息，请至公司官网 medicapture.com Support (技术支持) 一节查阅 *USB300 用户指南*。
- 打印机若未与 USB300 相连，则您在检视模式时按下 **选单 (Menu)** 按钮将不会显示「打印」画面 (上面的步骤 3)。

¹本文件适用于执行韧体 110701 及更高版本的 USB300 录像机。如欲检查您的韧体版本，请使用「进阶」选单中的「目前设定」选项。如需韧体之前版本的相关文件，请浏览 medicapture.com/support。如需韧体版本升级协助，请寄电子邮件到 support@medicapture.com。

²本机器目前不支持其他打印机机种。

³如果您用的是 A4 纸张，打印队列可容纳 3 个图像。如果您用的是 8.5" x 11"(Letter 尺寸) 的纸张，打印队列可容纳 2 个图像。

⁴若机器设定为影像录到网络驱动器则无法使用此项功能。