

MediCap[®] USB300 列印指南

適用於韌體 110701 及更高的版本¹

MediCap USB300 能夠在 Sony UP-DR80MD 醫療彩色印表機上列印圖像²。如需本台印表機的詳細資訊，請參閱 Sony 公司的相關文件說明。

如何連接印表機

用印表機所附的接線，將印表機接到 USB300 機身背面的 USB 連接埠，然後將印表機電源線插進牆壁插座。確定印表機的電源已打開，專用紙張已經裝好。該印表機及 USB300 錄影機均不需另外設定。

如何列印

列印時，您要將圖像放到「列印佇列」，然後印出一頁含有這些圖像的頁面。您只需按 USB300 上的按鈕來執行這些步驟，不需按印表機上的按鈕。

1. 錄下一些畫面後，請按**選擇 (Select)** 按鈕以進入「檢視模式」。
2. 使用前進和後退鈕 (箭頭按鈕) 來找出您想要列印的圖像。
3. 按下**選單 (Menu)** 按鈕。「列印」畫面將會顯示。本畫面提供三個選項：返回、列印與快速列印。
4. 選擇「列印」。這個指令會將第一個圖像放到列印佇列。
5. 選擇「返回」。這個指令會讓您回到檢視模式。
6. 重複步驟 2-5，來將更多圖像放進列印佇列³。
7. 當最後一個圖像被放進列印佇列時，包含這些圖像的頁面即開始自動列印，列印佇列隨即清空。

列印附註說明

- 如欲在佇列未滿之前即列印圖像，您可以在放進想要的圖像後選擇「快速列印」。如果您希望一頁只印一個圖像，這個選項就相當好用。
- 病例編號會列印在每一頁最上方，圖像編號則印在每個圖像旁邊。如果您有選用患者資料這項功能，則患者資料會列印在每一頁最上方 (姓、名等等)。
- 「列印」螢幕左下角會顯示印表機紙卷所剩餘的列印張數。
- 本機器通常提供目前病人面診的圖像列印。如欲列印之前患者面診的圖像，請利用「患者檢視」功能⁴。欲使用此項功能，請到「進階選單」選擇「儲存管理」，然後選擇「患者檢視」。這會讓您看到之前患者面診中的圖像。當您看到想要列印的圖像時，請按下**選單 (Menu)** 按鈕 (上面的步驟 3)。如需「患者檢視」功能的更多資訊，請至公司官網 [medicapture.com Support](http://medicapture.com/Support) (技術支援) 一節查閱 *USB300 使用者指南*。
- 印表機若未與 USB300 相連，則您在檢視模式時按下**選單 (Menu)** 按鈕將不會顯示「列印」畫面 (上面的步驟 3)。

¹本文件適用於執行韌體 110701 及更高版本的 USB300 錄影機。如欲檢查您的韌體版本，請使用「進階」功能表中的「目前設定」選項。如需韌體之前版本的相關文件，請瀏覽 medicapture.com/support。如需韌體版本升級協助，請寄電子郵件到 support@medicapture.com。

²本機器目前不支援其他印表機機種。

³如果您用的是 A4 紙張，列印佇列可容納 3 個圖像。如果您用的是 8.5" x 11"(Letter 尺寸)的紙張，列印佇列可容納 2 個圖像。

⁴若機器設定為影像錄到網路磁碟機則無法使用此項功能。